




Szybki Test Kasetowy BIOZEK COVID-19 IgG / IgM Oferuje:

- ✓ Wysoką dokładność z ponad 92,9%!
- ✓ Szybki wynik już w 10 minut
- ✓ Prosta obsługa bez specjalistycznego sprzętu
- ✓ Test można wykonać z próbki krwi z palca, krwi pełnej lub osocza!

Szybki test IgG / IgM BIOZEK COVID-19

Uznany jest za wiarygodną diagnozę choroby koronawirusa (COVID-19)


- Szybki test IgG / IgM BIOZEK COVID-19 jest immunologicznym testem chromatograficznym z przepływem bocznym do jakościowego wykrywania przeciwciał IgG i IgM przeciwko COVID-19 w ludzkiej krwi pełnej, surowicy lub osoczu w czasie zaledwie 10 minut.
- Kombinowane zastosowanie testu IgM i IgG może skutecznie odzwierciedlać wirusa i status immunologiczny organizmu.

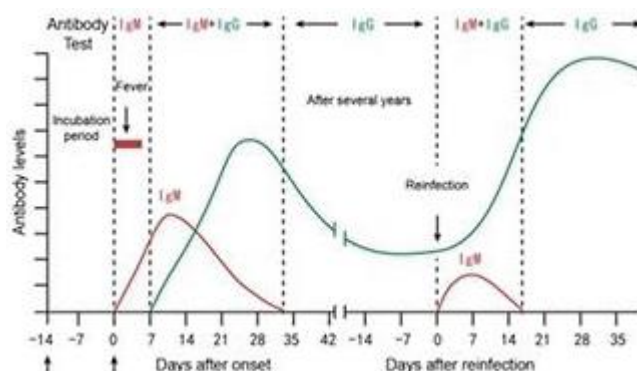

Instrukcja Szybki test IgG / IgM BIOZEK COVID-19

- Test z krwi pełnej, osocza lub surowicy
 1. Umyj ręce i przygotuj wszystkie elementy testu na czystej powierzchni.
 2. Nanieś na Szybki Test IgG / IgM BIOZEK COVID-19 w pole oznaczone „S”, dużą kroplę (10 - 20qL) krwi pełnej, osocza lub surowicy przy pomocy strzykawki lub pipety.
 3. W to samo pole „S” dodaj 2 krople płynu buforowego dołączonego do zestawu.
 4. Wynik testu odczytaj po 10 minutach.

- Test z krwi pobranej z palca – krwi kapilarnej
 1. Umyj ręce i przygotuj wszystkie elementy testu na czystej powierzchni.
 2. Odbezpiecz nakłuwacz jednorazowy.
 3. Gazikiem nasączonym alkoholem zdezynfekuj miejsce na palcu które zamierzasz nakłuć. Poczekaj ok 30-60 sekund, aż alkohol odparuje.
 4. Nakłuwaczem nakłuj palec. Jeśli pojawi się zbyt mała kropla krwi ściśnij palec parokrotnie aż się pojawi większa ilość.
 5. Przy pomocy strzykawki lub pipety pobierz krew z palca i nanieś na Szybki Test IgG / IgM BIOZEK COVID-19 w pole oznaczone „S”, dużą kroplę (10 - 20qL).
 6. W to samo pole „S” dodaj 2 krople płynu buforowego dołączonego do zestawu.
 7. Wynik testu odczytaj po 10 minutach.

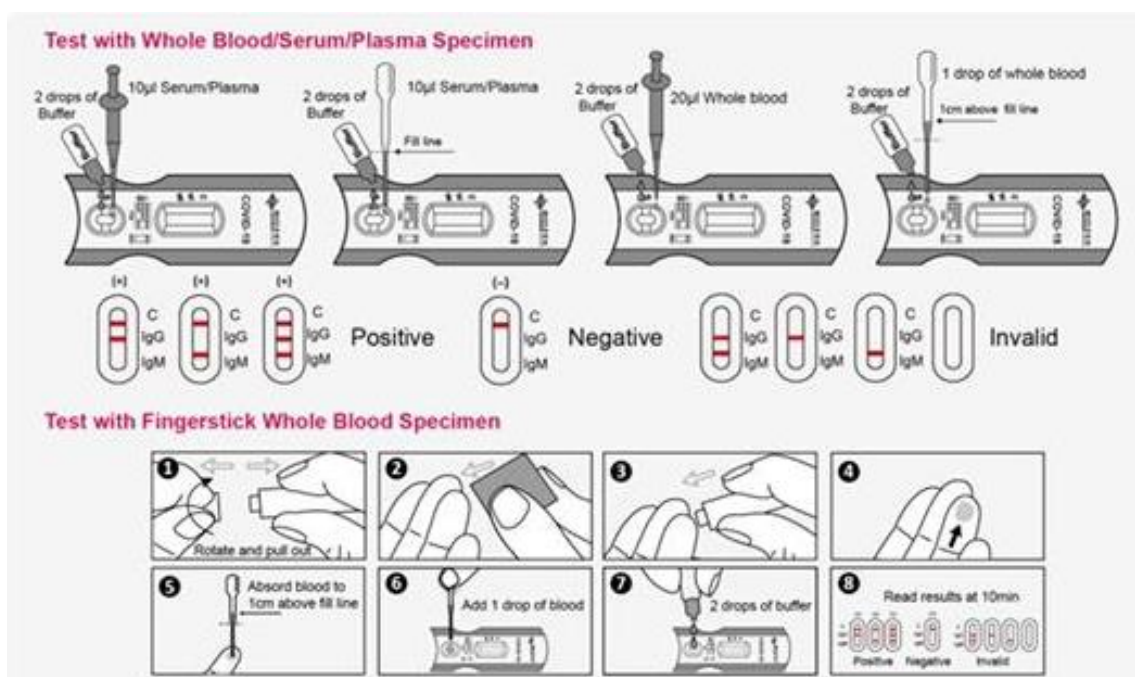

Interpretacja wyniku:

Wynik **POZYTYWNY**:

C (+) | IgG (+) | IgM () lub C (+) | IgG () | IgM (+) lub C (+) | IgG (+) | IgM (+)

Wynik **NEGATYWNY**:

C () | IgG () | IgM ()

Test źle wykonany lub za mało materiału do badania:

C () | IgG (+) | IgM (+) lub C () | IgG (+) | IgM () lub C () | IgG () | IgM (+) lub C () | IgG () | IgM ()

! Uzyskując wynik pozytywny pilnie skontaktuj się z najbliższą placówką podstawowej opieki zdrowotnej, stacją sanitarno-epidemiologiczną lub szpitalem **!**